



ClotPro Thromboelasztográf

Rövid használati útmutató



1. lépés

A teszcellafedőt helyezük a fedőtartóra.




2. lépés

Helyezzük a tesztcellát a tesztcella csatornába.



3. lépés

Helyezzük fel az aktív pipettahegyet a pipettára és szívjunk fel 340 μ l citrátos teljes vért.

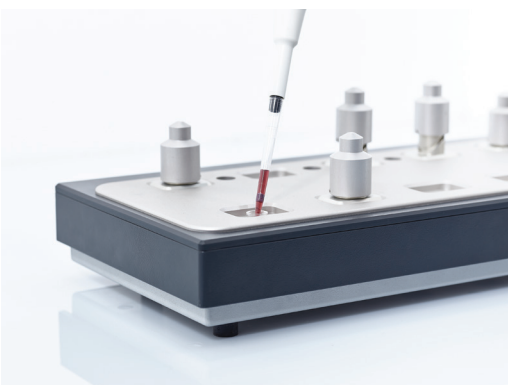

4. lépés

Pipetázzuk a mintát a tesztcellába.




5. lépés

Még egyszer szívjuk fel, majd töltsük vissza a mintát a tesztcellába a hatékonyabb keverés miatt.



6. lépés

A tesztcellafedő tartót helyezze a teszt pozícióba.

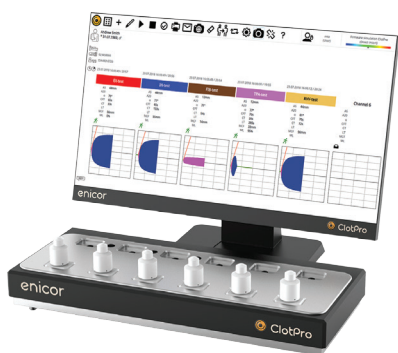

7. lépés

Elindul a mérés.



8. lépés

A mérés befejeztével, tekerje a tesztcellafedő tartót balra, hogy kivehesse a zárt tesztcellát.



9. lépés

Távolítsa el a tesztcellát, kezelje veszélyes hulladékként.