




QCdil

Diluens QC1-hez / QC2-höz

REF 113112

6 x 5,0 ml

nem steril

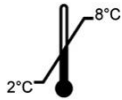

CE **IVD**



enicor GmbH
Reichenbachstr. 27 – 80469 München,,
Németország
Telefonszám: +49 89 997 428 181
www.clot.pro - info@clot.pro

In vitro diagnosztikai használatra

Felhasználási terület

A QCdil a ClotPro® analizátoron végrehajtott minőségellenőrzési mérésekhez szükséges QC1 és QC2 minták feloldására szolgáló oldat. ⁽¹⁾

A csomag tartalma:

6 darab 5,0 ml-es cső

Összetevők

A QCdil oldat felhasználásra készen kerül csomagolásra. A diluens kalcium-klorid (2mmol) és desztillált víz keveréke.

A reagens kezelése

Felhasználás előtt a QCdil oldatot 37 °C-ra elő kell melegíteni oly módon, hogy a csövet legalább 10 percre a ClotPro analizátor előmelegítő pozíciójára helyezik.

1,36 ml QCdil oldat egy fiola QC1 vagy QC2 feloldásához elegendő.

1 QCdil cső legfeljebb három QC fiola feloldásához elegendő oldatot tartalmaz.

A QC fiolák tartalmának QCdil oldattal történő feloldásához az alábbiak szerint használható a ClotPro e-pipetta:

Adagoljon négyszer 340 µl QCdil oldatot egy QC fiolába (=1360 µl). Ha egy adagban szeretné a QCdil oldatot a QC fiolába juttatni, használhat egy 1360 µl-re előre beállított térfogatú pipettát is.

REV 001 CE_HUN_Ellenőrizve 2019-02

Tárolás és eltarthatóság

+2 és +8 °C között tárolandó. Felbontás előtt a csövek a cső címkéjén található lejárat dátumig tarthatók el. Felbontást követően a csövek tartalmát 8 napon belül fel kell használni.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Csak képzett személyek általi professzionális használatra. Tartsa be a laboratóriumi reagens használatára vonatkozó általános óvintézkedéseket. A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A professzionális felhasználók számára kérésre biztonsági adatlapot biztosítunk. Biztosítsa a megfelelő tárolási feltételeket. Amennyiben egyéb anyagokkal való szennyeződés lehetősége áll fenn, ne használja fel a csövet.

Használati feltételek:

Az olyan változók, mint például a hőmérséklet, a tárolás, a készülék tulajdonságai és az egyéni használat befolyásolhatják a végső eredményt. Ezért szigorúan tartsa be a gyártó útmutatásait a ClotPro analizátor és a reagens használatával kapcsolatban.^(2; 3)

Felhasznált irodalom

- (1) Calatzis A., Wittwer M., Leyser H., Hipp Q., Spannagl M. ClotPro – a new generation viscoelastic whole blood coagulation analyser. *Hämostaseologie* 2018; 4a, A32, P013
- (2) ClotPro felhasználói kézikönyv REV001 vagy újabb.
- (3) QC 1, QC 2, EX-teszt teszt és IN-teszt használati útmutató REV001 vagy újabb.

Gyártó

enicor GmbH
Reichenbachstr. 27 – 80469 München,,
Németország
Telefonszám: +49 89 997 428 181
www.clot.pro - info@clot.pro

Forgalmazó:

DiaCare Solution Kft.
2089 Telki, Cinege utca 10.
tel: +36-20-417-9550, +36-20-367-3173
www.diacaresolution.com, info@diacaresolution.com